


Übersicht über Driva™ Bohrer

TM, TSV® und Eztetic®

Verwenden Sie einen Permanentstift, um die Gesamtanzahl der mit dem jeweiligen Bohrer durchgeführten Osteotomiepräparationen zu verfolgen. Es wird empfohlen, wiederverwendbare Bohrer nach 15 Anwendungen zu ersetzen.

*Einwegbohrer müssen nach jedem Eingriff entsorgt werden.



	0201	SV2.3DN	SV2.4DN	ZOP28DN	SV2.8DN	TSV3DN	SV3.4DN	TSV3.8DN	SV3.8DN	TSV4DN	SV5.1DN	TSV6DN	SV2.3DSN	SV2.8DSN	TSV3DSN	SV3.4DSN	TSV3.8DSN	SV3.8DSN	TSV4DSN	SV5.1DSN	TSV6DSN			
	Ø 2,1/1,6 mm Könischer Pilotbohrer, 8 mm – 11,5 mm L	Ø 2,3 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 2,4 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 2,8/ 2,4 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 2,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 3,4/ 2,8 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 3,8/ 3,4 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 4,4/ 3,8 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 5,1 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 5,7/ 5,1 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 2,3 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 2,8 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 3,4/ 2,8 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 3,4 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 3,8/ 3,4 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 4,4/ 3,8 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 5,1 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 5,7/ 5,1 mm Stufenbohrer, 16 mm L			
Bohrse- quenz																								
Zeit zur Bestellung neuer Bohrer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*Einwegbohrer müssen nach jedem Eingriff entsorgt werden. Diese Übersicht dient nur als Kurzanleitung. Die Anzahl der möglichen Verwendungen je Bohrer variiert und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Knochendichte, korrekte Handhabung und Reinigung. Vollständige Informationen zur Reinigung und Sterilisation finden Sie in der Gebrauchsanweisung für Biomet 3i Sets und Instrumente (P-ZBDINSTRP) unter ifu.biomet3i.com.

HINWEIS: Chirurgische Instrumente können durch viele Ursachen beschädigt werden, unter anderem durch zu langen oder unsachgemäßen Gebrauch, nachlässigen Umgang, unzureichende Reinigung usw. Damit die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Instruments gewahrt bleibt, muss es vorsichtig behandelt werden.

SO ERKENNEN SIE

ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS

Stumpfe Schneidkante

Abgerundete Spitze

Abgerundete Ecke

Prüfung auf Verschleiß und Beschädigung

Unterziehen Sie alle Produkte und Sets vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Schäden und/oder übermäßigen Verschleiß (z. B. Korrosion oder Rostbildung an der Oberfläche des Instruments, Strukturverschleiß oder -beschädigung, Vorhandensein von Schäden an Gummiringen sowie teilweise oder vollständige Brüche). Wenn Schäden oder Verschleiß festgestellt werden, die die Funktion des Instruments beeinträchtigen könnten, **NICHT VERWENDEN**. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter von Zimmer Biomet, um Ersatz zu erhalten.

Vollständige Informationen zur Reinigung und Sterilisation finden Sie in der Gebrauchsanweisung für Biomet 3i Sets und Instrumente (P-ZBDINSTRP) unter ifu.biomet3i.com.

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Kontaktieren Sie uns unter
zb.bestellung@zimmerbiomet.com
oder besuchen Sie uns unter
www.zimmerbiometdental.com

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc., hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist ausschließlich für Ärzte bestimmt und beinhaltet keinerlei medizinische Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0729DE REV B 02/20 ©2020 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

CE
2797

