

# Llave de carraca indicadora de bajo torque

Evaluación precisa del torque



# La llave de carraca indicadora de bajo torque

## La solución diseñada para ofrecer a los odontólogos una evaluación adecuada del bajo torque

La llave de carraca indicadora de bajo torque (L-TIRW) es una llave de carraca exclusiva diseñada para la odontología restauradora. La llave de carraca indicadora de bajo torque tiene un diseño elegante y es fácil de usar, y ofrece a los odontólogos una opción de la que no disponían hasta ahora: un instrumento de bajo coste que permite evaluar el torque de forma precisa al colocar los componentes de restauración.

La llave de carraca indicadora de bajo torque (L-TIRW) indica un torque normal e inverso de hasta 35 Ncm sin necesidad de componentes adicionales.



## Multifuncional

La llave de carraca indicadora de bajo torque (L-TIRW) tiene la función doble de llave de carraca convencional para colocar los componentes de restauración y de indicador de torque para proporcionar una evaluación visual del torque.

## Fácil de separar y de montar

Al constar de solo dos piezas, la llave de carraca indicadora de bajo torque (L-TIRW) es fácil de preparar para la esterilización y de montar para usar.

## No necesita lubricación ni recalibración


La llave de carraca indicadora de bajo torque (L-TIRW) no precisa lubricación ni recalibración. La calibración se confirma verificando que la flecha indicadora de torque se encuentra en la primera marca de la escala (0 Ncm).



## Aplicación del torque

1. Para colocar un componente de restauración, use la punta destornilladora adecuada y garantice que queda encajado del todo en el adaptador:

- Adaptador L-TIRW estándar ISO 1797 (C9980) 
- Adaptador L-TIRW corto ISO 1797 (C9981)

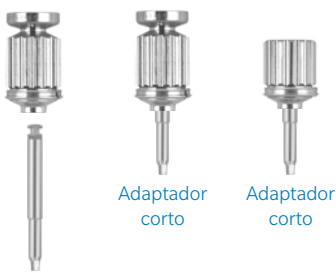

Adaptador corto  
Adaptador corto

Conjunto punta destornilladora/adaptador

3. Durante la aplicación del torque, presione con el dedo a lo largo del eje vertical del mango rugoso y del componente de restauración para garantizar que la punta destornilladora no se sale del componente de restauración.




## Indicación del torque

5. Para evaluar la cantidad de torque que se está aplicando al componente de restauración, gire el brazo de torque en la dirección de la flecha de la cabeza de la llave de carraca, la cual está situada en el mismo lado que el mango rugoso del adaptador estándar cuando está montado. Mida y anote el torque indicado.



2. Introduzca en la llave de carraca el conjunto adaptador/punta destornilladora con el mango rugoso mirando hacia arriba. Un clic indicará que se ha producido una conexión segura dentro de la llave.

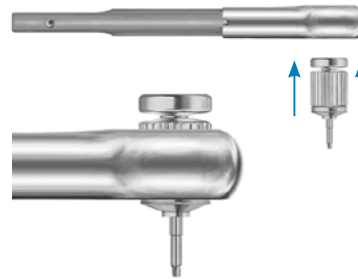

4. Mantenga juntos el cuerpo principal y el brazo de torque con el dedo pulgar y el índice.

La dirección de aplicación del torque (la marca "IN" se refiere a la inserción del componente de restauración, y la marca "OUT" hace referencia a la extracción del componente de restauración) la indica la dirección de la flecha de la cabeza de la llave situada en el mismo lado que el mango rugoso del adaptador.



## Información para pedidos

Referencia	Descripción
L-TIRW	La llave de carraca indicadora de bajo torque incluye: adaptador L-TIRW estándar ISO 1797 (C9980)
L-TIRWK	El kit de accesorios de L-TIRW incluye: adaptador L-TIRW estándar ISO 1797 (C9980), bandeja de llave de carraca indicadora de torque (RTI2035TR), punta destornilladora hexágono grande con ángulo recto estrecha de 24 mm (RASH3N), punta destornilladora cuadrada con ángulo recto estrecha de 24 mm (RASQ3N)
RTI2035TR	Bandeja de llave de carraca indicadora de torque
C9980	Adaptador L-TIRW estándar ISO 1797
C9981	Adaptador L-TIRW corto ISO 1797



Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite [zimmerbiometdental.es](http://zimmerbiometdental.es)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Tel.: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Teléfono: 93-470-59-50  
Fax: 93-372-11-25  
Atención al cliente: 900 800 303

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet; y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZBINST1108ES REV A 09/17 ©2017 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

