

Chiave Dinamometrica ad alto Torque



**Controllo
dinamico e
immediato
dell'inserimento
dell'impianto**

1 Precisione

- Indica i livelli durante l'inserimento implantare, dando dei valori dinamici che partono da 50 fino a 90 Ncm.

2 Semplicità

- Facile da assemblare per la pulizia, la sterilizzazione e l'uso. Nessuna lubrificazione o calibrazione necessaria.

3 Versatilità

- Compatibile con il posizionamento di impianti Trabecular Metal™, TSV®, Eztetic® e Tapered SwissPlus® Implant.

Zimmer Biomet offre ora una chiave dinamometrica a coppia elevata con indicatore, che consente il posizionamento di impianti dentali con controllo dinamico e immediato della coppia.

ZTIRW



Il modello ZTIRW è compatibile con il posizionamento di impianti Trabecular Metal, TSV, Eztetic e Tapered SwissPlus; tutti e tre i componenti dello strumento sono di colore argento.

NOTA: quando si utilizza ZTIRW per l'indicazione della coppia, se si prevede una coppia di inserimento elevata durante il posizionamento dell'impianto, sono necessarie la preparazione dell'osso denso e la maschiatura per ridurre la coppia di inserimento a 90 Ncm o inferiore. Quando si tira il braccio indicatore della coppia, non superare 90 Ncm. Utilizzare il corpo di ZTIRW, senza tirare il braccio indicatore della coppia, come una chiave a cricchetto tradizionale, per coppie fino a 110 Ncm.

Smontaggio facile per la pulizia e la sterilizzazione



Indicazione della coppia in avanti e indietro da 50 a 90 Ncm

Informazioni per l'ordine

Cod. articolo	Descrizione
ZTIRW	Chiave a cricchetto a coppia elevata con indicatore per impianti Trabecular Metal, TSV, Eztetic e Tapered SwissPlus (i cacciaviti per impianti compatibili comprendono CHR2.1, CHRL2.1, RH2.5, RHL2.5, HX3.0-S, HXL3.0-S, OT3.0-S, OTL3.0-S e supporti per impianti)

Per informazioni: +39-0438-37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più società che si occupano di cure dentali di Zimmer Biomet Holdings, Inc e sono commercializzati da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Le chiavi a cricchetto a coppia elevata con indicatore HTIRW e Z-TIRW sono fabbricate da Elos Medtech Pinol A/S. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZBINST0067IT REV A 10/20 ©2020 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

