

Llaves de carraca indicadoras de alto torque



Información dinámica del torque

1 Precisión

- Indica los niveles de torque de inserción hacia adelante e inversos del implante desde 50 hasta 90 Ncm.

2 Simplicidad

- Se puede montar y desmontar fácilmente para su limpieza, esterilización y uso. No necesita lubricación ni calibración.

3 Versatilidad

- Hay disponibles dos diseños de llave para permitir la colocación de implantes adicionales de Zimmer Biomet con una llave de carraca indicadora de alto torque.

Zimmer Biomet ofrece ahora dos llaves de carraca de alto torque, que permiten la colocación de implantes dentales adicionales con información dinámica del torque. Las dos llaves de carraca son visualmente distintas para diferenciarlas y facilitar la selección precisa para el implante que se va a colocar.

H-TIRW



H-TIRW se utiliza con implantes T3® y Osseotite® y posee una junta y un cabezal negro. El torque de inserción durante la colocación de estos implantes con H-TIRW no debe exceder los 90 Ncm.

ZTIRW



ZTIRW es apta para la colocación de los implantes Trabecular Metal™, TSV®, Eztetic® y Tapered SwissPlus®; los tres componentes de la herramienta son de color plateado. Para mayor distinción visual respecto a la llave H-TIRW, esta incluye una línea marcada a láser en el cabezal de la herramienta y el número de pieza [ZTIRW] grabado en el cuerpo.

NOTA: Si se prevé un alto torque de inserción durante la colocación del implante, se requiere preparación del hueso denso y terraja para reducir el torque de inserción a 90 Ncm o menos al utilizar ZTIRW para la indicación del torque. No exceda los 90 Ncm al tirar del brazo indicador de torsión. Utilice el cuerpo de la llave ZTIRW, sin tirar del brazo indicador de torque, como una llave de carraca, para torsiones de hasta 110 Ncm.

Fácil desmontaje para limpieza y esterilización



Indicación de torque hacia adelante e inverso desde 50 a 90 Ncm

Información para pedidos

Referencia	Descripción
H-TIRW	Llave de carraca indicadora de alto torque para implantes T3 y Osseotite (portaimplantes compatibles: IRE100U, IRE200U para implantes con conexión Certain® y RE100, RE200 para implantes con hexágono externo)
ZTIRW	Llave de carraca indicadora de alto torque para implantes Trabecular Metal, TSV, Eztetic y Tapered SwissPlus (portaimplantes compatibles: CHR2.1, CHRL2.1, RH2.5, RHL2.5, HX3.0-S, HXL3.0-S, OT3.0-S, OTL3.0-S y monturas de fijación de implantes)

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. El fabricante de las llaves de carraca indicadoras de alto torque HTIRW y ZTIRW es Elos Medtech Pinol A/S. Si desea más información sobre algún producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZBINST0064ES REV A 07/20 © 2020 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

