

Tapered SwissPlus[®] Implantatsystem

Vielseitigkeit oberhalb und unterhalb des Knochens



Überblick



Das Tapered SwissPlus Implantatsystem vereinfacht Ihre Implantatfälle durch umfassende Lösungen für komplizierte Restaurationsanwendungen.

Das Tapered SwissPlus Implantat wird auf Gewebeebene in einem einstufigen chirurgischen Verfahren eingesetzt. Die maschinerte Implantatschulter fungiert als transmukosale Erweiterung des Implantats, auf das die Prothesenkomponenten der Restauration aufgebracht werden. Die MTX[®] Mikrotextur des Implantats, die das Gewinde umfasst, wird subkrestal inseriert.

Das Tapered SwissPlus Implantatsystem bietet die folgenden Vorteile:

- Nur ein chirurgisches Verfahren ist erforderlich, was dem Arzt Zeit spart.
- Der Wegfall des zweiten chirurgischen Eingriffs bedeutet ein geringeres Trauma für den Patienten.
- Der Arzt kann die Osseointegration besser überwachen, indem er vom Zeitpunkt des Eingriffs an Zugang zum Implantat hat.
- Das Weichgewebe um die Implantatschulter heilt vom Zeitpunkt der Implantatplatzierung, was zusätzliche Inzisionen oder eine Heilperiode in einer zweiten Phase überflüssig macht.
- Das Implantat umfasst eine chirurgische Deckschraube und wird bereits mit einer firmeneigenen Einbringhilfe-/ Abformungskomponente verbunden geliefert, die für das Einbringen, die Abformung und als finales Abutment mit vollständiger Kontur verwendet wird.



**Transmukosaler Teil
des Implantats**

Intraossaler Teil des Implantats

Prothesenkomponenten

Abformung, zementierter Zahnersatz*

Abformung

Indirekte

Abformung

(mit Schraube für geschlossene Abformlöffel)

Ø 3,8 mm Plattform
Ø 4,6 mm Konus



FMSM
inklusive Implantat

SPMT

Ø 4,8 mm Plattform
Ø 5,2 mm Konus



FMS
inklusive Implantat

OPT/5

Ø 4,8 mm Plattform
Ø 6,0 mm Konus



FMSW
inklusive Implantat

OPT/6

Direkte Abformung

(optionales Verfahren für offene Abformlöffel, Abformung inklusive Implantat, Schrauben werden getrennt verkauft)



FMSM mit DHTS



FMS mit WSX



FMSW mit WSX

Laboranaloge



SPMR



OPR

Zementierte Restaurationen

Gerade

Abutment/

Abdruckkappe

(mit Schraube)

Ø 3,8 mm Plattform
Ø 4,6 mm Konus



FMSM
(inklusive Implantat)

Ø 4,8 mm Plattform
Ø 5,2 mm Konus



FMS
(inklusive Implantat)

OPA/5

Ø 4,8 mm Implantatplattform
Ø 6,0 mm Konus



FMSW
(inklusive Implantat)

OPA/6

Schmal

Gerade

Abutment

(mit Abformpfosten/ Aufwachskäppchen) und Laboranalog (getrennt verkauft)



SPMA2 mit MHLAS und SPMC
Einzelkrone und Brücke



SPMAR
(Abutment-
Laboranalog)



OPA mit OPC
Einzelkrone und
Brücke



OPA2 mit GPCAS und OPC
Einzelkrone und Brücke



OPAR
(Abutment-
Laboranalog)

20° abgewinkelte

Abutments für

6 Positionen

(mit Schraube)



SPH20 mit AH20S



OPH20 mit OPH20S



Individueller Zahnersatz, verschraubter Zahnersatz*

Individueller Zahnersatz
Angussfähiger
Zahnersatz und
ausbrennbare
Kunststoffabutments
mit Schraube

Zahnersatz mit
Einzelkrone
(angussfähiges Gold-
Abutment)

Zahnersatz mit Brücke
(angussfähiges
Gold-Abutment ohne
Rotationsschutz)

Zahnersatz mit
Brücke
(Kunststoff, ohne
Rotationsschutz)

Ø 3,8 mm Plattform



SPGA mit MHLAS und OPS
optimale, lange Einwachsschraube: MTWSD

Ø 4,8 mm Plattform



OPGA mit GPCAS und OPS
optionale, lange Einwachsschraube: WSX

n. z.



OPGC mit GPCAS und OPS

n. z.



OPCC mit GPCAS

Verschraubter
Zahnersatz
(nur für Plattformen
mit Ø 4,8 mm)

Tapered Abutment
Nur für mehrgliedrige
Versorgungen ohne
Rotationsschutz (mit
Einheilkappe)

Tapered
Abutment
Komponenten

Ø 4,8 mm Plattform



OPACT mit TATHC
1,6 mm



OPACT3 TATHC
3,0 mm



ACTIT
Konisches
Abutment
Indirekte
Abformung



ACTDT
Konisches
Abutment
Direkte
Abformung



ACTR
Konisches
Abutment-
Laboranalog
stellt
konisches
mit Implantat
verbundenes
Abutment dar



ACTGC
Konisches
Abutment
Goldgerüst
mit Schraube
(SCTS) und
Hülse (OPS)



ACTP
5,0 mm
Ausbrennbares
Kunststoffgerüst
mit
Schraube (SCTS)



TGC3
3,0 mm
Konisches
Abutment



TGC5
5,0 mm
Konisches
Abutment



TTC5
5,0 mm
Konisches
Abutment
Titansteg-
Gerüst
mit Schraube
(SCTS)



ACTT
Temporäres
Titangerüst
mit Schraube
(SCTS)

Deckprothese – Restaurative Komponenten

Deckprothesen

LOCATOR® Abutment

Ø 3,8 mm Implantatplattform



Ø 4,8 mm Implantatplattform



Locator- Komponenten

Hinweis: Ersatzsteckteile sind verfügbar. Siehe Produktkatalog.



Deckprothesen

Kugelform-Abutment mit Kappen- Attachment

Ø 4,8 mm Implantatplattform



Kugelform- Abformungskomponenten



Konisches SwissPlus Implantatsystem*

Tapered (konische) Implantate

(verfügbare Längen: 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm, 14,0 mm); inklusive 2-mm-L-Deckschraube

Ø 3,7 mm



SPMB8 SPMB10 SPMB12 SPMB14

Ø 3,7 mm



SPB8 SPB10 SPB12 SPB14

Ø 4,8 mm



SPWB8 SPWB10 SPWB12 SPWB14

Plattformen mit Einbringhilfe

Ø 3,8 mm Implantatplattform
SPMB Serie (Innensechskant)



FMSM im Lieferumfang des Implantats enthalten

Ø 4,8 mm Implantatplattform
SPB und OPB Serie (Innenachtkant)



FMS inklusive Implantat

Ø 4,8 mm Implantatplattform
SPWB und OPWB Serie (Innenachtkant)



FMSW inklusive Implantat

Chirurgische Deck-schrauben

Ø 3,8 mm Plattform
Ø 4,6 mm Konus



SPSC, 2 mm L • SPSCL, 3 mm L

Ø 4,8 mm Plattform
Ø 5,2 mm Konus



OPSCS, 1 mm L • OPSC, 2 mm L • OPSCSCL, 3 mm L


Ø 4,8 mm Plattform
Ø 6,0 mm Konus




OPWSC, 2 mm L • OPWSCL, 3 mm L

* Die dargestellten Teile dienen nur der Veranschaulichung und zeigen nicht die exakte Geometrie des Abutments.

SwissPlus chirurgische Werkzeuge*

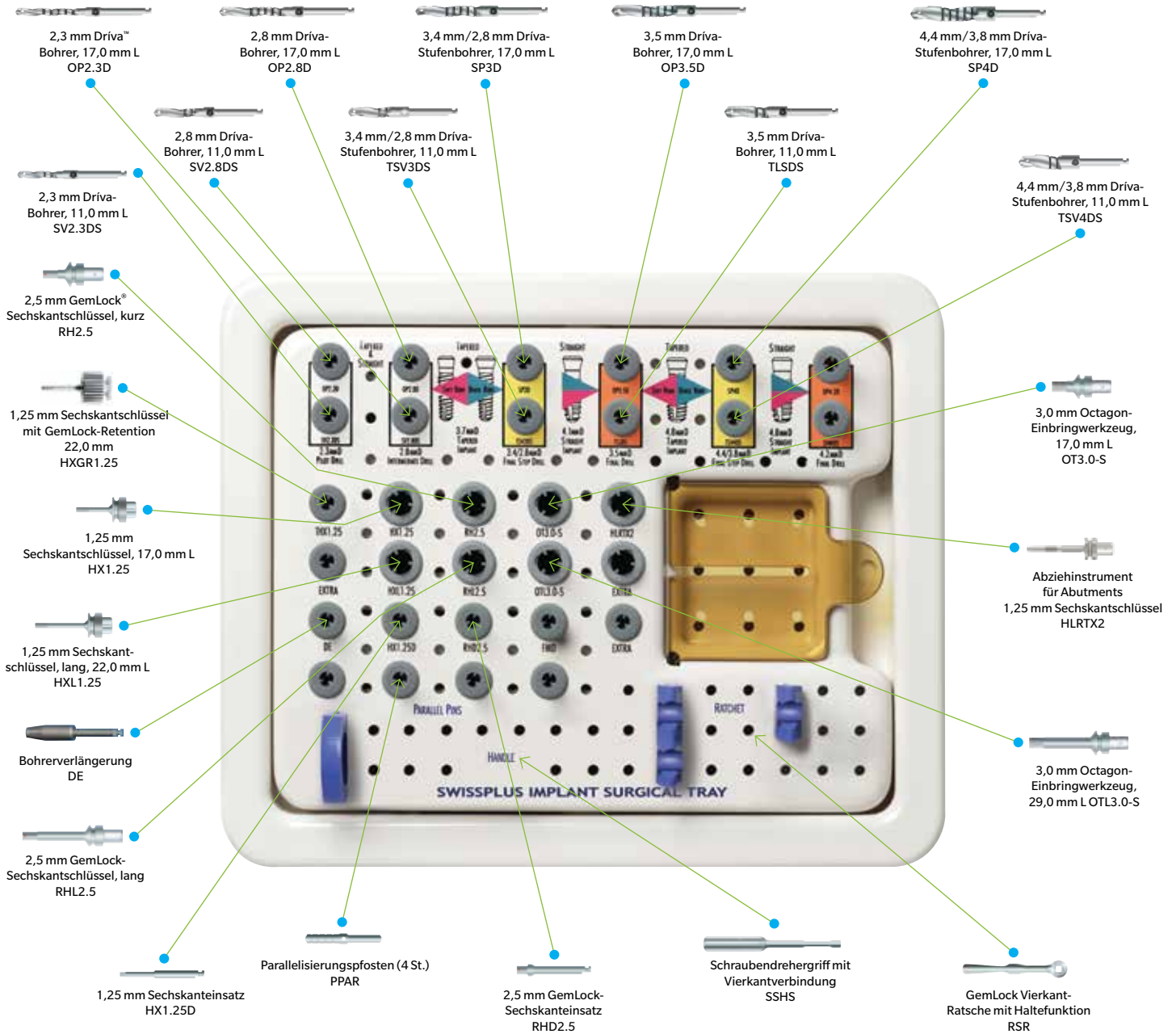

Prothesenwerkzeuge und Drehmomentschlüssel*

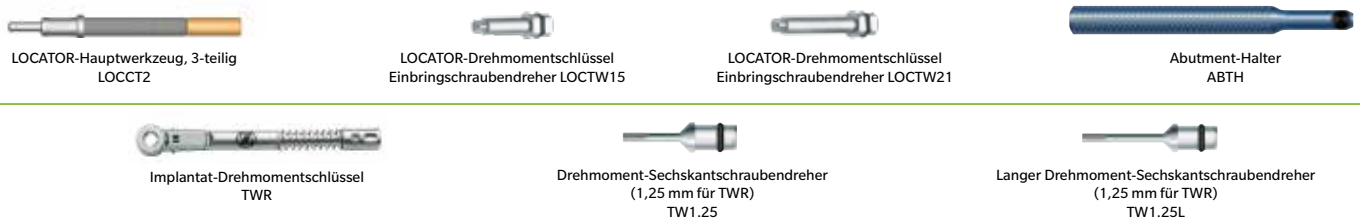

* Die dargestellten Teile dienen nur der Veranschaulichung und zeigen nicht die exakte Geometrie des Abutments.



Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen

Sie uns unter www.zimmerbiometdental.de

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A- 1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. LOCATOR® ist eine Marke von Zest IP Holdings, LLC. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder / Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZB0186DE REV C 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

